

Wandhalterung Desinfektionsmittel Hexadermal

Allgemeine Hinweise zur Anbringung


Beipack:

- 6 x Dübel
- 4 x M5 x 12 Senkkopfschrauben ISO 10642
- 2 x M5 x 10 Linsenschrauben DIN 7985 (ISO 7045)




Montage der Wandhalterung:


1. Prüfen Sie den Montageort und markieren Sie die Bohrlöcher an der Wand. Verwenden Sie die Befestigungslöcher der Spenderrückseite als Schablone um die Bohrlöcher an der richtigen Stelle einzuzeichnen. Bohren Sie die Löcher an der eingezeichneten Stelle und setzen Sie die mitgelieferten Dübel in die Löcher ein.

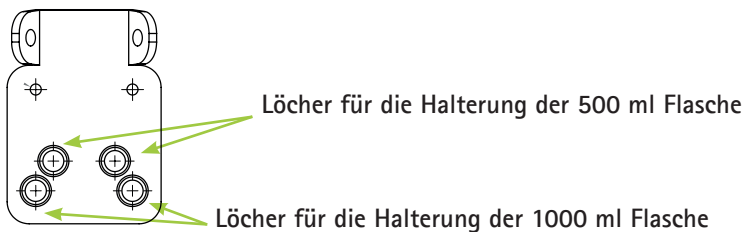

2. Stecken Sie (wenn noch nicht zusammengebaut) den Hebel in die vorgesehene Halterung.

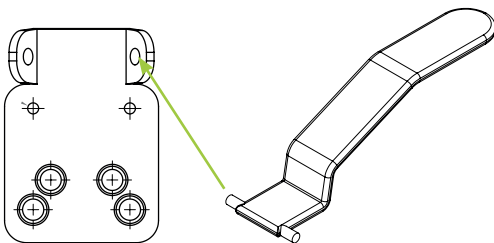

3. Setzen Sie die Löcher von Teil 3 auf die Löcher von Teil 2 und setzen Sie die mitgelieferten Senkkopfschrauben ein. In die oberen Löcher von Teil 1 setzen Sie die Linsenschrauben und schrauben alles an die Wand.

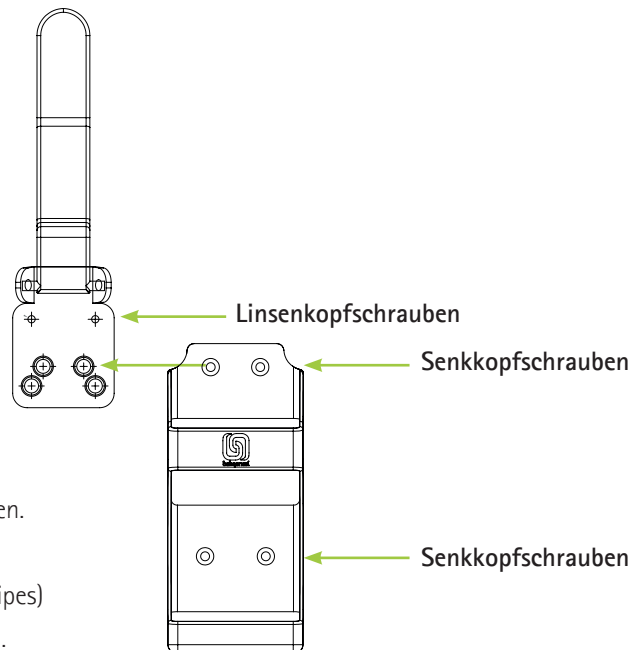

Aufbereitung:

Halterung nach Bedarf, aber spätestens bei Flaschenwechsel reinigen.
 Zur manuellen Aufbereitung die Halterung mit einem Flächendesinfektionsmittel (z.B. Alvatech® Spray oder Alvatech® Wipes) abwischen. Die Einwirkzeit des Desinfektionsmittels ist zu beachten.

Vertrieb:

HOZ MEDI WERK
 Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG
 Am Sülzenbrückener Wege 3
 D-99334 Amt Wachsenburg

Hersteller:

Kuzey Saglik Ürünleri ve
 Kimya Sanayi A.S.
 Gersan San. Sitesi 2310 sok. No: 47
 Yenimahalle-Ankara/TURKIYE