

Alvatech Spray®

Technisches Datenblatt

Alvatech Spray – Alkoholhaltiges Flächendesinfektionsmittel

- Alkoholhaltige Sprüh- und Wischdesinfektion
- Gebrauchsfertige Lösung
- Aldehyd- und phenolfrei
- Enthält erfrischende Duftstoffe
- Gute Benetzung, schnelle und fleckenfreie Abtrocknung
- IHO und VAH gelistet



1. Anwendungsgebiete:

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen.

Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG): Zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen und nicht-invasiven Medizinprodukten.

2. Anwendung:

Zu desinfizierende Flächen gleichmäßig und bis zur vollständigen Benetzung einsprühen oder auf ein geeignetes Einmaltuch geben und die Oberflächen damit abwischen. Die empfohlene Einwirkzeit beträgt 1 bis 5 Minuten.

3. Ausführungen:

Lieferform	PZN	EAN-Nummer	Pack/VE
500 ml Spenderflasche	15423321	8680789009436	20

4. Wirkspektren und Einwirkzeiten:

Bakterizid (inkl. MRSA & VRE):	konzentriert 30 Sek.
Tuberkulozid	konzentriert 60 Sek.
Levurozid, Fungizid	konzentriert 30 Sek.
Viruzid (Adeno, Polio, Noro) gem. EN 14476	konzentriert 5 Min.

5. Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: Ethanol 40 g, 2-Propanol 9,5 g, Didecyldimethylammoniumchlorid 0,25 g.

Sonstige Bestandteile: n-Butanol 2 g, Korrosionshemmstoffe.

6. Zulassung:

Gemeldet als Biozid-Produkt bei der BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidverordnung.

Reg.-Nr.: N-75585

7. Chemisch-physikalische Daten:

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit

Dichte: 0,908 g/cm³ +/- 0,05 g/cm³ (bei 20 °C)

pH-Wert: 7,0 +/- 1

8. Haltbarkeit:

 2 Jahre

Standzeit:

Nach Anbruch der Flasche innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

9. Stand der Informationen: 03/2020


10. Sicherheitshinweise:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Behälter dicht verschlossen halten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/ internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen

Alvatech Spray vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Gefahr

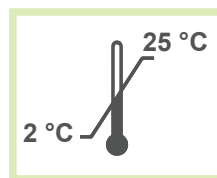

N-75585

CE 1984

Hersteller:



Kuzey Saglik Ürünleri ve
Kimya Sanayi A. S.
Gersan San. Sitesi 2310 sok. No: 47
Yenimahalle-Ankara/TURKIYE
Phone: +90 312 256 66 96
www.kuzey saglik.com.tr

Exklusivvertrieb:



HOZ MEDI WERK
Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Am Sülzenbrückener Wege 3
D-99334 Amt Wachsenburg
Telefon: +49 (0)3 62 02 8 81-0
Telefax: +49 (0)3 62 02 8 81-35
E-Mail: info@hoz-medi-werk.de
Internet: www.hoz-medi-werk.de